



マットレスに敷いたまま使用する ポジショニングシート

Hjälpia Positioning Sheets



特徴

- 通気性があります。洗濯機と乾燥機が使用できます。 *柔軟剤は使用不可
- 防水シートはセカンドシートの上に重ねて使用します。
- 介護用リフトを併用したベッド上のケアにも使用できます。
- 被介助者の体に直接触れる回数を減らします。
- 被介助者との距離を確保しながら、表情を確認してケアができます。
- 骨折や浮腫など、ケアに苦慮する困難症例の方にも活用できます。
- 介護保険：福祉用具貸与(体位変換器)の製品です。

使用例



■ 寝位置の補正



■ 体位変換



■ おむつ交換



■ 創傷ケア



■ 端座位



■ 腹臥位

こちらから、詳しい使用説明動画をご覧になれます。 ➡



寝位置の補正

ベッド上の寝位置を、介助者1名、介助者2名、介護用リフトを併用した、様々な方法で補正します。



介助者1名



介助者2名



介護用リフトと併用

体位変換

マニュアルハンドリングでも、介護用リフトを併用しても、セカンドシートの大きな面で被介助者を包み、やさしくケアができます。



マニュアルハンドリング



介護用リフトと併用

おむつ交換・創傷ケア

介護用リフトを併用すると、介助者1名で実施できます。介助者は両手を使ったケアを提供できます。

● おむつ交換



交換するおむつのテープを剥がします。



リフトで側臥位にします。



新しいおむつのテープ固定をして整えます。

● 創傷ケア



リフトで側臥位にします。



創傷部のケアをします。



新しいおむつを仮当てして仰臥位に戻します。

ポイント 背中清拭もリフトを併用して、介助者は両手を使ったケアを提供できます。

端座位

介助者1名、介助者2名、介護用リフトを併用した、様々な方法で端座位姿勢を取ることができます。



介助者1名



介助者2名



介護用リフトと併用

腹臥位

マットレスカバーロング×1枚と、セカンドシート4方向用ロング×2枚の計3枚のポジショニングシートで行います。

● ピローを併用する場合



ピローをあてがいます。



白い滑る面を上向きにしたセカンドシートを被介助者の上に被せます。



2枚のセカンドシートをまとめてつかみます。



マットレスカバーの上を滑らせてマットレスの端に寄せます。



セカンドシートがほどけないよう、しっかりとついで回転させます。



上側のセカンドシートを取り除き、ピローと体の位置を確認します。

● 経口チューブ等が挿入されている場合



白い滑る面を上向きにしたセカンドシートを被介助者の上に被せます。



2枚のセカンドシートをまとめてつかみます。



頭部がマットレス上端を超える位置まで被介助者を上方に滑らせながら移動させます。



マットレスカバーの上を滑らせて、セカンドシートがほどけないようしっかりとついで回転させます。



チューブ類が抜かないよう、回転動作に合わせて頭部を支えます。



頭部がマットレス上に戻る位置まで被介助者を下方に滑らせながら移動させて、セカンドシートを取り除きます。



■ ポジショニングシートを選ぶ目安



被介助者が上肢で体位
変換が可能な方

マットレスカバー × 1枚

金属製の装具等を装着の上、ベッド上でお過ごしの場合は、マットレスカバーのショートをお勧めします。



被介助者が全介助必要
な場合など、介助者の
介入が必要な方

マットレスカバー × 1枚 + セカンドシート × 1枚

セカンドシートは被介助者の膝辺りまでカバーすると使いやすいです。
身長が高い方や、大柄な方はロングサイズをお勧めします。




腹臥位姿勢のケアを実施
する場合

マットレスカバー × 1枚 + セカンドシート × 2枚

長さは3枚とも被介助者の全身をカバーする、ロングサイズをお勧め
します。

■ 構造

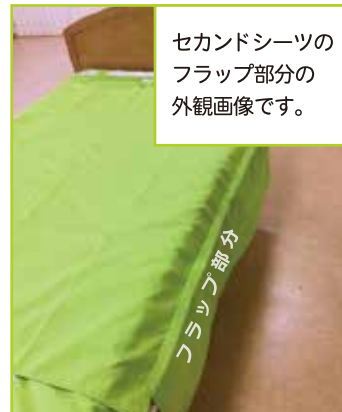

マットレスカバー
表示ラベルがアタマ側にくるようセット
します。

セカンドシート(2方向用)
マットレスカバーおよびセカンドシート
の上下を確認してセットします。

セカンドシート(4方向用)
マットレスカバーおよびセカンドシート
の上下を確認してセットします。

リフトを使用する際は、セカンド
シートについているハンドルに
アクセサリの体位変換シート用
ループを併用することも可能です。
(セカンドシート付属品)

< スペック表 >

型番	品名	滑り方向	サイズ	重さ	色・素材	お手入れ	適応体重	TAISコード	販売単位	定価(税抜)
----	----	------	-----	----	------	------	------	---------	------	--------

■ マットレスカバー 介護保険：福祉用具貸与(体位変換器)

MCS205002	体位変換用シートMCショート	4方向 ^{*1}	140×200cm	0.4 kg	表裏両サイド：緑色(ポリエステル、綿) 表裏中央：白色(ポリエステル(サテン))	洗濯機洗濯可 柔軟剤不可 低温タンブル乾燥可	300kg 以下	01624-000010	1枚	16,000円
MCL205001	体位変換用シートMCLロング	4方向 ^{*1}	200×200cm	0.6 kg				01624-000011		20,000円

^{*1} 白色部分が4方向

■ セカンドシート 介護保険：福祉用具貸与(体位変換器)

FSS206002	体位変換用シートFSショート	4方向	140 ^{*2} ×180cm	0.8 kg	表全面：緑色(ポリエステル、綿) 裏全面：白色(ポリエステル(サテン)) 裏両サイド一部：緑色(ポリエステル、綿)	洗濯機洗濯可 柔軟剤不可 低温タンブル乾燥可	300kg 以下	01624-000012	1枚	28,000円
FSL206001	体位変換用シートFSロング	4方向	200 ^{*2} ×200cm	1.1 kg				01624-000013		36,000円
STSS207002	体位変換用シートSTSショート	2方向	140 ^{*2} ×180cm	0.6 kg	表裏全面：緑色(ポリエステル、綿)	洗濯機洗濯可 柔軟剤不可 低温タンブル乾燥可	300kg 以下	01624-000014	1枚	20,000円
STSL207001	体位変換用シートSTSLロング	2方向	200 ^{*2} ×200cm	0.8 kg				01624-000015		26,000円

^{*2} フラップを含む

■ アクセサリ セカンドシートに付属しています。追加用に単品をご用意しています。

LFE208150	体位変換用シート用ループ	—	円周長 60cm×2本	—	茶色(ポリエステル)	洗濯機洗濯可 柔軟剤不可 低温タンブル乾燥可	300kg 以下	JANコード 4560113568935	2本/セット	6,000円
-----------	--------------	---	----------------	---	------------	------------------------------	-------------	-------------------------	--------	--------

※ 製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※ 本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※ 本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
https://www.sheen-man.co.jp
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

輸入元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業