
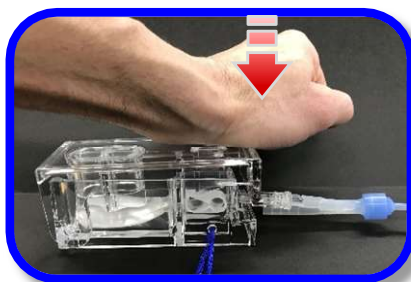


# バルるん


間欠式バルーンカテーテル(ディヴィンターナショナル社製)の  
バルーンを簡単に膨らませる自助具です

リザーバーを「押しつぶす」操作と クランプを「閉じる」操作を同時に行うことができます

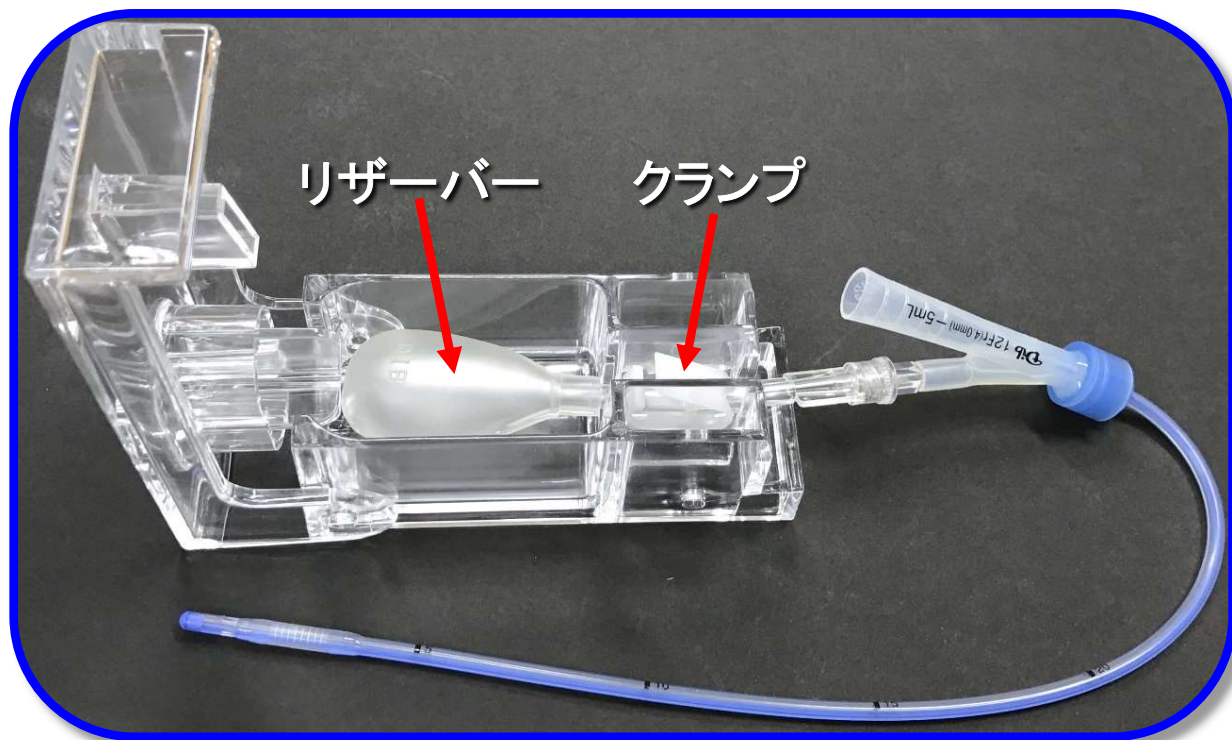

## カテーテル挿入

- ・膀胱にカテーテルを挿入
- ・自助具の内部にリザーバーとクランプをセット
- ・ふたの上面を押す(リザーバーをつぶす)
- ・バルーンが膨んだ後にクランプが閉じる

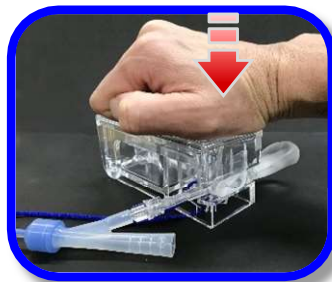

## カテーテル抜去

- ・閉じたクランプを自助具の本体とふたの間に挟む
- ・ふたの上面を押す(クランプ開放)
- ・膀胱からカテーテルを抜く

お問い合わせ先

独立行政法人労働者健康安全機構  
吉備高原医療リハビリテーションセンター

〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511  
E-mail [kenkyu@kibirihah.johas.go.jp](mailto:kenkyu@kibirihah.johas.go.jp)  
URL <http://www.kibirihah.johas.go.jp>  
Tel 0866-56-7141 Fax 0866-56-7772

製造・販売

タキゲン製造株式会社

神戸支店

〒605-0047 神戸市中央区港島南町1-4-9  
E-mail [kobe@takigen.co.jp](mailto:kobe@takigen.co.jp)  
URL [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)  
Tel 078-303-9001 Fax:078-303-9002