



スウェーデンより登場!!

Flowboard Oval

フローボード オーバル



フローボードオーバルXSサイズ

フローボードオーバルMサイズ


特徴

- フローボードオーバルは2枚1組で使用します。
- 適度にしなり、楕円形で滑らかな表面です。容易にセットして、引き抜くことができます。
- ポリエチレン素材で、お手入れは洗剤や消毒液で清拭できます。

使用例



■ 寝位置の補正

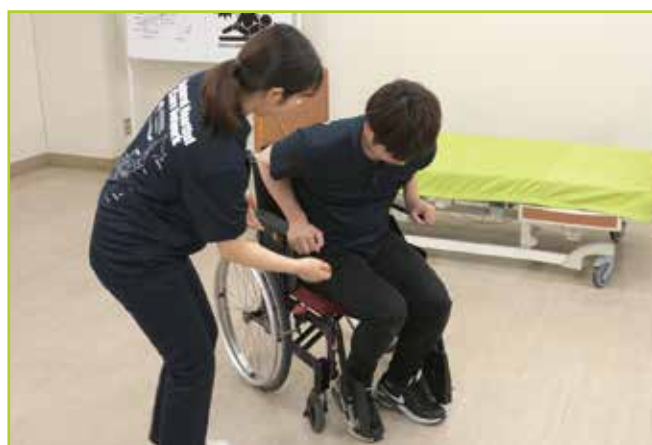

■ 座奥への座り直し



■ 仰臥位姿勢でスリングシート装着の補助



■ 座位姿勢でスリングシート装着の補助

こちらから、詳しい使用説明動画をご覧になれます。



寝位置の補正

足と足底に力が込められる軽度被介助者は、ご自分の力でベッド上方へ移動できます。



被介助者の左右両側から1枚ずつ体幹に対して平行に差し込みます。



被介助者自身が両膝を曲げて足底を踏ん張り、ベッド上方へ伸びあがるようにして上方へ移動します

ポイント

- ①エアマットレスとの組み合わせにも適しています。
- ②介助者が被介助者の足底を固定し、体幹部分をフローボードオーバルの上で移乗します。

座奥への座り直し

座位姿勢の座り直しを補助します。



軽度被介助者の場合



被介助者の足を車いすのフットレスト等に乗せ、大腿部を座面から浮かせます。



被介助者の両足大腿の下にフローボードオーバルXSサイズ1枚をそれぞれ差し込みます。



被介助者は前傾姿勢を取り、車いすのアームサポートをつかみながら車いすの座面の奥に向けて臀部をスライドします。

重度被介助者の場合



フローボードオーバルXSサイズは赤く色付けしております

被介助者を前傾姿勢にします。大腿部の下にフローボードオーバルXSサイズ1枚を、それぞれ差し込みます。



被介助者の膝を押し、車いすの座面の奥に向けてポジショニングを行います。



フローボードオーバルXSサイズを外側より引き抜きます。

スリングシートの装置の補助

被介助者の姿勢を変えることなく、スリングシートの装着ができます。



仰臥位姿勢の場合

フローボードオーバルMサイズを使用



フローボードオーバルMサイズ2枚を被介助者の左右両側から1枚ずつ体幹に対して平行に差し込みます。



スリングシートの足側から被介助者の尾骨の位置まで引き込みます。



スリングシートの中心が被介助者の体幹中央から外れないように注意します。

◎エアマットレスとの組み合わせにも適しています。

座位姿勢の場合

フローボードオーバルMサイズとフローボードオーバルXSサイズを使用



フローボードオーバルMサイズ2枚を被介助者の背中と車いすの背もたれの間差し込みます。



スリングシートの足側からフローボードオーバルMサイズ2枚の間を通し、中心が被介助者の背中と合うよう調整します。



スリングシートを引き下ろし被介助者の背後にセットします。



フローボードオーバルXSサイズは赤く色付けしております

両足の大腿部の下にフローボードオーバルXSサイズを敷き込みます。



フローボードオーバルXSサイズに赤く色付けしております

クッションとフローボードオーバルXSサイズの間スリングシートを敷き込みます。



スリングシートの脚部を引き上げます。

＜フローボードオーバル スペック表＞

型番	品名	サイズ	色・素材	耐荷重	お手入れ	TAISコード	販売単位	定価(税抜き)
FBOXS	フローボードオーバル XSサイズ	45x20cm	ブラック・ポリエチレン	150kg	ぬるま湯または石鹸水で清拭。消毒が必要な場合は70%エタノールや45%イソプロパノールあるいはそれに近い消毒液を使用。	01624-000025	2枚/セット	34,000円
FBOM	フローボードオーバル Mサイズ	85x39cm	ブラック・ポリエチレン	150kg		01624-000026	2枚/セット	43,800円

※本品は医療機器ではありません。

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。



スウェーデンより登場!!

Flowboard

フローボード

多様な座位移乗を補助します。
テイクオフベルト(別売)と併用できます。

こんな座位移乗の時に
ご使用できます。



ベッド



トイレ



車の座席



使用例 重度被介助者の場合はテイクオフベルト(別売)との併用をお勧めします。



軽度被介助者の場合
ご自身でフローボード上を移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例1〕
介助者が被介助者を支えながら移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例2〕
動きに合わせて介助者の体の向きを変えながら2〜3回に分けて移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例3〕
テイクオフベルト(別売)を併用して体幹を支えやすくして移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例4〕
テイクオフベルト(別売)を併用して被介助者の背面より介助して移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例5〕
テイクオフベルト(別売)を併用して被介助者2名で介助して移乗します。



フローボードSサイズ表面



フローボードSサイズ裏面



フローボードMサイズ表面



フローボードMサイズ裏面



フローボードLサイズ表面



フローボードLサイズ裏面

※フローボードLサイズとMサイズには折り曲げ線が入っております。

< フローボード スペック表 >

型番	品名	サイズ	色・素材	耐荷重	お手入れ	TAISコード	販売単位	定価(税抜き)
FBS	フローボード Sサイズ	60x25cm	グリーン・ポリエチレン	150kg*	ぬるま湯または石鹸水で清拭。消毒が必要な場合は70%エタノールや45%イソプロパノールあるいはそれに近い消毒液を使用。	01624-000027	1枚	21,000円
FBM	フローボード Mサイズ	60x33cm	グリーン・ポリエチレン	150kg*		01624-000028	1枚	22,800円
FBL	フローボード Lサイズ	74x33cm	グリーン・ポリエチレン	150kg*		01624-000029	1枚	32,000円

* 移乗する隙間幅により耐荷重は異なります。

※本品は医療機器ではありません。

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
https://www.sheen-man.co.jp
マーケティング部 新規事業開発課
担当部署 大阪府北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06) 6354-2900 FAX (06) 6354-5525

輸入元

スーガン株式会社
大阪府北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044