

体位変換・移乗用マット

# ホバーマット

少人数

安全

快適

## 腹臥位への体位変換

少ない人数と力でラインをケアしながら安全に行える。  
体位変換後の位置調整や、ポジショニングクッション等の  
差込みも簡単。




動画は  
こちら



## 除圧

背抜き補助となる除圧効果。

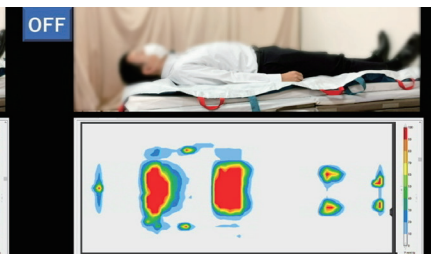

「ON」ホバーマットを膨らませた状態

「OFF」ホバーマットの空気が抜けている状態

動画は  
こちら



こんなお困りごとに

- 腰痛
- エアマットが効かない
- ライトラブル
- 人手不足
- 背抜きが大変
- 皮膚障害
- 患者の体重が重くて重労働
- 患者が痛がる

## 移乗

ベッドからストレッチャー（オペ台）等へ。  
段差があるところでも、安全に楽々と移乗が可能。



動画は  
こちら



患者さんにも嬉しい

- 掴まれたり、無理に引っぱられたりする不快感がない
- 空気で包まれるような快適な乗り心地

## X線カセット挿抜

送気した状態で、楽々と挿抜が可能。  
X線透過性があるのでマットを敷いたまま撮影できます。



動画は  
こちら



患者さんにも嬉しい

- 痩せて骨ばった患者さんでも痛くない

## ベッド上での位置調整



## シムス位や完全側臥位への体位変換



## ホバーマット ユーザーの声

1

Q. どのようなことでお困りのご施設に導入してもらいたいですか？

それがホバーマットがあることによって解消されるのではないかなと思います。

北海道大学病院  
ICUスタッフナース 菊谷様

北海道大学病院 ICU  
スタッフナース  
菊谷 麻璃菜 様

動画は  
こちら▶



日本手術看護学会WEBセミナー動画

### 動画 0:15:00 頃～

Q. X線カセット挿入に使用されていますか？

- A. ホバーマットがないと患者さんを持ち上げて、度々抜き差ししないといけなかった。患者さんに痛みがあったり、カセットの位置調整のたびに負担があったが、それらが全くなかった。  
さらにスタッフ数を3～4人→1～2人に減らせた。

### 動画 0:16:47 頃～

Q. ホバーマットを使用した体位変換について教えてください。

- A. 腹臥位への体位変換をはじめ、シムス位や完全側臥位への体位変換も普通に行うより楽にできるし、人手が少なくて済むようになった。  
ポジショニングも非常に質が高くできている。

### 動画 0:24:20 頃～

Q. 人手が足りていれば機器はいらない、という意見に対して

- A. 何人もの患者さんの対応をしないといけなくても、楽に体位変換が行えるため疲労は蓄積せず、集中力も保てるし、安全管理などにも目を向ける余力が残る。  
ホバーマットがあるのとないのとでは全く違うということを実感した。

体位変換・移乗用マット

## ホバーマット

- ✓ 体位変換
- ✓ 移乗
- ✓ 除圧 etc.

エアを送気し、患者を浮かせることで患者の移動に要する人力を患者体重の10分の1に軽減します。



製品詳細は  
こちらから



## ホバーマット ユーザーの声

# 2



関西電力病院 放射線科  
放射線技師  
鈴木 量 様

動画は  
こちら▶



日本手術看護学会WEBセミナー動画

### 動画 0:06:35 頃～

Q. ホバーマットをどんな風に活用していますか？

- A. 小さな看護師さん、力の弱い看護師さんが大きな患者さんを運ぶときに今までバックボードで運んでいたのとは動力が全然違う。マット移動で撮影台に載ってすぐにX線撮影できるのがすごく便利。

### 動画 0:09:36 頃～

Q. 移乗においてどのようなメリットがあると思いますか？

- A. 医療スタッフにとっては、今まで力を入れて運ばないといけなかったのが、空気力で移動ができるようになったという点。  
以前は院内の褥瘡委員会で報告されるような皮膚のトラブルもあったが、ホバーマットを導入してからは一切なくなった。  
そういう点で患者さんのメリットも大きい。

### 動画 0:22:27 頃～

Q. 人手が足りていれば機器はいらぬ、という意見に対して

- A. 毎回毎回人手が足りているのなら良いと思うが、どうしても救急や女性だけで運ばないといけない時などにはホバーマットがあった方がいい。  
一度使ってしまうと、ないと困る現状になっている。

ホバーマットデモ機お貸出いたします！お気軽にご相談ください

お問い合わせは二次元バーコードか、お電話にてご連絡ください

Meilleur  
mèi jū:

(株)名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台 3-9-2  
TEL: 047-480-6161 <https://www.meilleur.co.jp>

