



バルるん


間欠式バルーンカテーテル(ディヴィンターナショナル社製)のバルーンを簡単に膨らませることができる自助具です

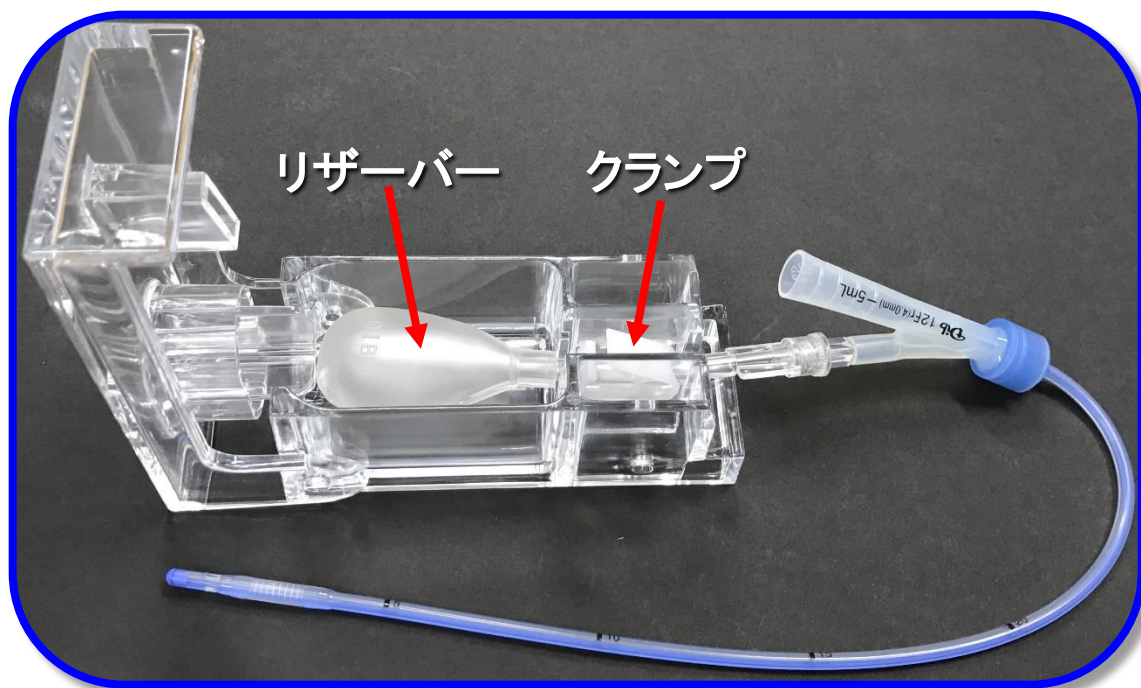

リザーバーの「押しつぶし」とクランプの「閉じる」操作を同時に行うことができます

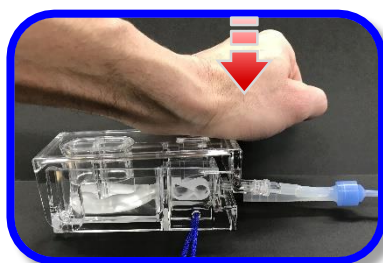

カテーテルを膀胱に挿入後
リザーバーとクランプを自助具の内部にセットします
手でふたの上面を押し込むこと
バルーンが膨らみ(内部のリザーバーを押しつぶす)
クランプが閉じます(滅菌水の流れを止める)

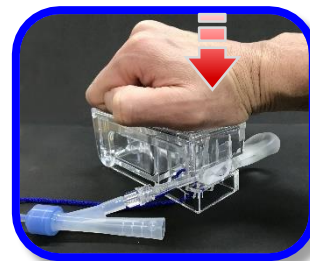

膀胱からカテーテルを抜く時は
閉じたクランプを自助具の本体とふたの間に挟み
ふたを押しつけてクランプを開放します

お問い合わせ先

独立行政法人労働者健康安全機構
吉備高原医療リハビリテーションセンター

〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511
E-mail kenkyu@kibirihah.johas.go.jp
URL <http://www.kibirihah.johas.go.jp>
Tel:0866-56-7141 Fax:0866-56-7772

販売元 岡山リハビリ機器販売(有)

〒700-0944 岡山市南区泉田350番地1
E-mail riha@hashimoto.co.jp
Tel.086-242-5500 Fax.086-242-5502

製造 タキゲン製造株式会社