

視線での入力を設計段階から取り入れた新世代の意思伝達装置

2021年度世界発信コンペティション 特別賞 受賞

第32回 中小企業優秀新技術・新製品賞 受賞

※写真のアイトラッカーは別売りです

「eeyes」は、限りなく小さい身体動作で、自分の意思を伝達するための福祉機器です。

重度障害者向け意思伝達装置

eeyes®



スイッチでも視線でもタッチでも

「気持ち伝わる」

言葉を紡げる

読み上げられる


絵文字も使える

メールが出せる

家電を操れる

設置や設定が簡単

チャレンジできる

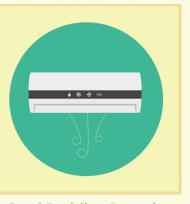

身体の状態に合わせて選べる3つの入力方法

スイッチで入力

入力したい文字にカーソルが重なったらスイッチ ON。縦横一回ずつスイッチを押して文字を決定します。



視線で入力

入力したい文字を見ると画面中央へ移動します。画面中央に来たら見続けるか、スイッチ ON で文字を決定します。



画面を固定しての入力もできるようにしました!

タッチで入力


タブレットタイプの eeyes なら、入力したい文字を指でタッチすれば文字が入力できます。



もっと早く!。もっと簡単に!。


履歴／メモ／定型文

発声した履歴、作成したメモ、300を超える定型文を呼び出し、素早く意思が伝達できます。

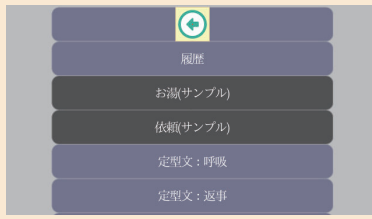


文字盤の編集

文字盤の編集機能を使えば、自由に文字盤を編集できるので、より使いやすい文字盤にカスタマイズが可能です。

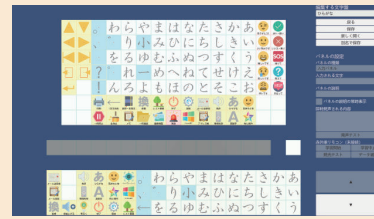

組み合わせ絵文字

絵文字を組み合わせれば、より簡単に意思が伝達できます。たとえば「背中が痛い」なら、たった2回の文字入力で相手に伝える事ができます。

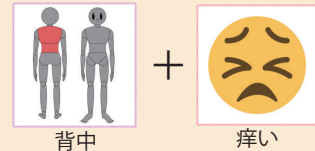

機能

| | |
|--------------|--|
| 操作方式 | スイッチでの操作、視線での操作、視線とスイッチ併用での操作、タッチでの操作※1 |
| 入力機能 | ひらがな(漢字・カタカナ変換あり)、絵文字、アルファベット、定型文入力、メモ入力、履歴入力 |
| 出力機能 | 合成音声発声、赤外線リモコン信号※2、外部スイッチ操作※3、外部スイッチ操作と呼び鈴分岐装置※4 |
| 通信機能 | 電子メール(送受信・受信した画像ファイルの表示) |
| Windows 操作機能 | マウス操作(クリック、スクロール、ドラッグアンドドロップ)、ペースト操作、リターンキー入力操作 |

※1: スイッチおよび視線入力装置は別売り。タッチ操作はタブレットタイプのみ利用可能。※2: テクノツール株式会社製「なんでも IR2」対応。※3: 別売りの eeyes 専用分岐装置を利用。※4: 別売りのダブル技研株式会社製「Bunking (バンキング) ボックス」を推奨。

価格

重度障害者向け
意思伝達装置

eeyes

¥450,000 (非課税)

本体および専用スイッチケーブル 付属品一式
重度障害者用意思伝達装置は補装具費支給対象品です。

詳細は WEB から

eeyes



<http://orangearch-labo.com/eeyes/>

・コエステーションはコエステ株式会社の登録商標または商標です。Microsoft、Windows10は、Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
・その他記載の全社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。



お問い合わせ、ご用命は・・・下記、正規販売店か、販売取扱店へご相談ください。

正規販売店

販売取扱店