

ポジショニングクッション エニモ

# Anymo

美しい30度側臥位をつくるポジショニングクッション。  
上半身と下半身どちらにもフィットする  
リバーシブル構造。

リバーシブル  
**Rモデル** 丸洗い・乾燥機OK

[エニモ本体]

Rモデル 600タイプ  
(CK-461)



Rモデル 800タイプ  
(CK-462)



[仕様・価格表]

●エニモ本体 介護保険/福祉用具貸与対象品目 **体位変換器**

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード	サイズ	材質
Rモデル 600タイプ	CK-461	9,800円(+税)	00206-000146	約30×60cm(ハンドル部は除く)	表側地/ポリエステル80%、綿20%
Rモデル 800タイプ	CK-462	11,800円(+税)	00206-000147	約30×80cm(ハンドル部は除く)	中身/ポリウレタンフォーム100%

●オプションカバー(別売)

通気タイプ	モデルタイプ	品番	価格	防水タイプ	モデルタイプ(ハンドル付き)	品番	価格
	Rモデル 600タイプ通気カバー	CH-171	4,000円(+税)		Rモデル 600タイプ防水カバー	CH-181	4,600円(+税)
Rモデル 800タイプ通気カバー	CH-172	4,700円(+税)	Rモデル 800タイプ防水カバー	CH-182	5,400円(+税)		
材質: ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)				材質: 表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・抗菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム(防水)			

●防水カバーセット(エニモ本体と防水カバー) 介護保険/福祉用具貸与対象品目 **体位変換器**

モデルタイプ	TAISコード	価格
R600タイプ 防水カバーセット	00206-000148	14,400円(+税)
R800タイプ 防水カバーセット	00206-000149	17,200円(+税)



※カバーは防水タイプのみハンドル付き

\*介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。\*商品の取扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。\*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。\*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。\*本カタログの掲載内容及び写真イラストの無断転載は固くお断りします。

製造販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889


お問い合わせ先

商品に関する詳しい情報は  
ケープのホームページをご覧ください <https://www.cape.co.jp/>

## 美しい30度側臥位をつくるために デザインされたエニモRモデル600/800タイプ

### 1 背中を乗せるだけでクッションが傾いて、きれいに角度がつく『スリット構造』。

スリット構造を支点にシーソーのようにクッションが自然に傾き、背中に差し込むだけでしっかり角度がつく構造です。

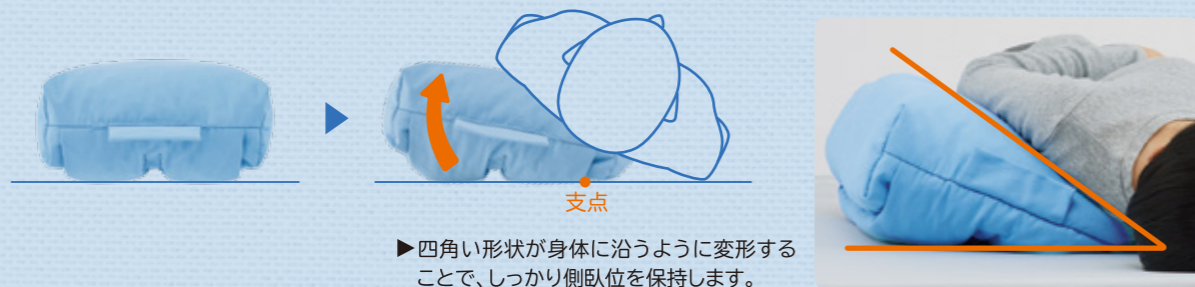

▶四角い形状が身体に沿うように変形することで、しっかり側臥位を保持します。

### 2 クッションが外れにくいから 時間が経っても姿勢が崩れにくい。

荷重により、スリットがマットレスに引っ掛かるように広がり、クッションの抜けを防止します。



### 3 肩から臀部までこの1本で支える からキレイにキマる。

従来の枕型クッションの2個分の長さで、男女問わず高齢者の肩から臀部まで1本でしっかり支えます。



### 4 下肢をのせる位置をガイドする『スリット構造』で 誰でも正しくポジショニングづくり。

下肢をのせる位置をガイドするスリット構造。スリットに下肢をのせるだけで、自重でスリット構造が下肢を包み込むようにホールド。下肢の安定感が増します。



スリットの凹凸はオプションカバーを装着しても視認できます。

高齢者のふくらはぎ幅の平均値10.8cmから割り出したスリット設計。

クッションを重ねて使わないから簡単。



高齢者が側臥位をとられた時に、上側になる下肢の高さにぴったり合うように、クッションの厚みを設計しました。

### 5 少ない数のクッションでもキレイにポジショニング。 リネンの委託費用もセーブできます。



## 高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐える ハイパフォーマンス素材

乾燥  
100℃

高温乾燥と水抜けの良い構造で  
中までしっかり乾きやすい。

2時間  
早い

従来品より約2時間早く乾燥。  
スピーディーに現場に戻ってきます。



極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。



大小のウレタンフォームを混合  
極小のウレタンフォームは  
体積が小さく、水分の含有  
量が少なくなるため、乾き  
が早くなります。

いつも清潔に、  
エニモなら消毒方法の選択肢が広がります。


次亜塩素酸  
ナトリウム  
500ppm

本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬することができます。



熱水  
80℃

本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。

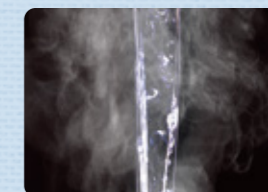

用途に合わせた2種類のオプションカバー。

オプションカバー（別売）

洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでタイプ別にご用意しています。



● 通気タイプ



● 防水タイプ

※防水カバーのみハンドル付き

