

セット内容/仕様

材質

男性用集尿器

快適なソフトシリコンタイプ
軽くて蒸れにくい
洗って何度でも使える
介護者の負担を軽減

Mr.ユリナー
特許第4758516号

トイレが心配な方のためのウェアラブル集尿器
装着しても目だたにくく
安心して外出できます



ウェアラブルタイプ
AS-URI S/M/L

車いすユリナー

車いすユーザーのために開発された集尿器
トイレの不安や負担を軽減し
安心して外出できます



ウェアラブルタイプ 車いす用
AS-KUR010

ダンディユリナー
特許出願済/意匠登録出願済

装着したまま就寝
寝たまま排尿できます



ウェアラブルタイプ 就寝用
AS-DUR010


手持ちユリナー

トイレまで行く必要がなく安心
夜間でも自分で排尿できます



手持ち型採尿器 就寝用
AS-TUR010

Soft silicone men's urine collector

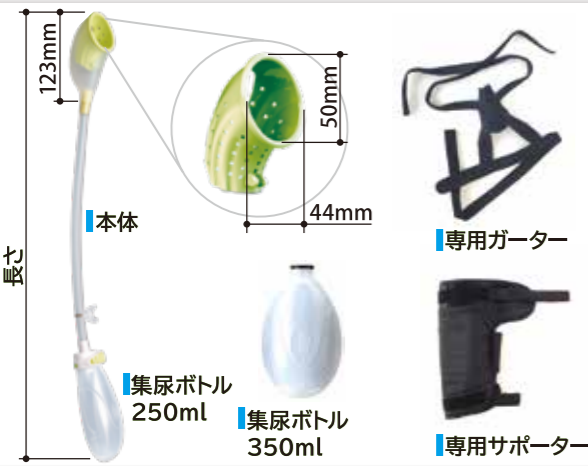

品名: Mr.ユリナー
品番: AS-URI (S/M/L)
本体重量: 145g (Mサイズ)

S
サイズ 長さ: 55cm / 56.5cm
股下: ~72cm
目安身長: ~160cm

M
サイズ 長さ: 60cm / 61.5cm
股下: 72~77cm
目安身長: 160~170cm

L
サイズ 長さ: 65cm/66.5cm
股下: 77cm~
目安身長: 170cm~

*長さ 250ml / 350ml
ボトル装着時 / ボトル装着時

- ・レシーバー : シリコン
- ・外チューブ : ポリ塩化ビニル(PVC)
- ・内チューブ : シリコン
- ・ボトル : ポリエチレン
- ・キャップ : ポリアセタール(POM)
- ・クリップ本体 : ポリスチレン
- ・クリップパネ : ステンレス(SUS 304)
- ・専用ガーター : ポリエステル
ポリプロピレン
- ・専用サポーター : ポリエステル
トリコット



男性用集尿器ウェアラブルタイプ AS-URI S/M/Lサイズ



品名: 車いすユリナー
品番: AS-KUR010
本体重量(本体): 200g
長さ: 60cm
専用パンツ
サイズ: フリーサイズ

- ・レシーバー : シリコン
- ・外チューブ : ポリ塩化ビニル(PVC)
- ・内チューブ : シリコン
- ・ボトル : ポリエチレン
- ・キャップ : ポリアセタール(POM)
- ・専用パンツ : ポリエステル、綿
- ・専用サポーター : ナイロン
ポリウレタン



男性用集尿器ウェアラブルタイプ車いす用 AS-KUR010



品名: ダンディユリナー
品番: AS-DUR010
レシーバー
寸法: W5.8 x D13.5 x H6cm
重量: 70g
集尿タンク
寸法: W30 x D24 x H11cm
重量: 390g
容量: 2.8L
チューブ長さ: 1.5m

- ・レシーバー : シリコン
- ・チューブ : ポリ塩化ビニル(PVC)
- ・キャップ : ポリアセタール(POM)
- ・タンク : ポリエチレン
- ・逆流防止膜 : ラテックス
- ・専用パンツ : ポリエステル



男性用集尿器ウェアラブルタイプ就寝用 AS-DUR010



品名: 手持ちユリナー
品番: AS-TUR010
レシーバー(ハンドル除く)
寸法: W5.8 x D13.5 x H6cm
重量: 70g
集尿タンク
寸法: W30 x D24 x H11cm
重量: 390g
容量: 2.8L
チューブ長さ: 1.5m

- ・レシーバー : シリコン
- ・チューブ : ポリ塩化ビニル(PVC)
- ・キャップ : ポリアセタール(POM)
- ・タンク : ポリエチレン
- ・ハンドル : ポリアセタール(POM)
- ・ふた : シリコン



男性用採尿器手持ち型 AS-TUR010



Mr.ユリナー

- 尿もれで困っている方へ
- 急な尿意が心配な方へ
- 立位と座位で使用可能
- 屋内外用装着したまま外出できます

ウェアラブルタイプ

二重構造のやわらかなシリコン製で通気性がよく、肌に優しいレシーバー

スポンの内側等に固定します

レシーバー

チューブ

二重構造のチューブで流れがスムーズ

上クリップ

ワンタッチキャップ

ワンタッチキャップ

ワンタッチで簡単にボトルとの着脱ができます。

集尿ボトル

ふくらはぎにフィットする形状

内レシーバー

二重構造チューブ

ワンタッチキャップ

*ズボンの中に装着するので、外からは見えません。

- 1 専用ガーターにレシーバーをセットします。
- 2 腰ベルトで、左右と高さの位置調節をします。
- 3 専用サポーターを足に通し、セットします。
- 4 集尿ボトルをネット状のポケットに入れて固定します。
- 5 上からズボンをはきます。

- 使用時は尿がスムーズに流れるように、軌道を確認してください。
- 重力で流れるようにする必要があります。
- 使用後は毎日洗い、消毒、乾燥をさせていただきます。

AS-URI S/M/L

車いすユリナー

- 尿もれで困っている方へ
- 急な尿意が心配な方へ
- 車いすで使用可能
- 屋内外用装着したまま外出できます

ウェアラブルタイプ車いす用

二重構造のやわらかなシリコン製で通気性がよく、肌に優しいレシーバー

レシーバー

チューブ

二重構造のチューブで流れがスムーズ

ワンタッチキャップ

ワンタッチキャップ

ワンタッチで簡単にボトルとの着脱ができます。

集尿ボトル

ふくらはぎにフィットする形状

内レシーバー

二重構造チューブ

ワンタッチキャップ

*ズボンの中に装着するので、外からは見えません。

- 1 専用パンツでレシーバーを包み込むようにとめます。
- 2 マジックテープでパンツを固定します。
- 3 集尿ボトルを、ネット状のポケットに入れて、固定します。
- 4 上からズボンをはきます。

- 使用時は尿がスムーズに流れるように、軌道を確認してください。
- 重力で流れるようにする必要があります。
- 使用後は毎日洗い、消毒、乾燥をさせていただきます。

AS-KUR010

ワンデイユリナー

- 寝たままの姿勢で排尿できます
- 装着したまま寝姿勢で使えます
- 屋内用

ウェアラブルタイプ就寝用

二重構造のやわらかなシリコン製で通気性がよく、肌に優しいレシーバー

レシーバー

集尿タンク

ワンタッチキャップ

ワンタッチキャップ

ワンタッチで簡単にタンクとの着脱ができます。

チューブ

逆流防止膜を装着

レシーバー内部流れやすい形状

より安心な逆流防止膜

高低差をつけ、尿を流れやすくして使用します。

- 1 専用パンツをはき、マジックテープを全て開く。
- 2 レシーバーをマジックテープで包むように留める。
- 3 チューブを調整し、尿がスムーズに流れるようにセットします。

・専用パンツかんたん着脱(フリーサイズ)

- 使用時は尿がスムーズに流れるように、軌道を確認してください。
- 重力で流れるようにする必要があります。
- 毎日洗い、消毒、乾燥をさせていただきます。

AS-DUR010

手持ちユリナー

- トイレまで行かずに排尿できます
- ベッドサイド等でつかえます
- 立位や座位、仰臥位などで使用可能
- 屋内用

手持ち型集尿器就寝用

二重構造のやわらかなシリコン製で通気性がよく、肌に優しいレシーバー

レシーバー

集尿タンク

ワンタッチキャップ

ワンタッチキャップ

ワンタッチで簡単にタンクとの着脱ができます。

チューブ

ハンドル形状

レシーバー内部流れやすい形状

レシーバーを手で持ち、チューブ側を下げてセットします。

様々な姿勢で使用することができます。

- 使用時は尿がスムーズに流れるように、軌道を確認してください。
- 重力で流れるようにする必要があります。
- 毎日洗い、消毒、乾燥をさせていただきます。

AS-TUR010