

現場の負担を減らす、新しい摘便のカタチ

# 新発売 !!

摘便バッグ (特許番号：特許第 7627528)

## ベントレール



安心

清潔

簡単

選ばれる理由 1

ここがいい!!

簡単に使える  
シンプル設計



選ばれる理由 2

においにくい!!

気になる臭いを  
極力カット



選ばれる理由 3

飛散を防ぎ  
安全な環境を  
提供

あんぜん!!

選ばれる理由 4

いつもの手袋で  
違和感なく  
作業可能

かんたん!!

### 装着は簡単3ステップ!!

- 1 挿入口を合わせる  
肛門の位置にしっかり合わせます
- 2 下を固定する  
大腿部の下側と肛門下をテープで固定
- 3 上を固定する  
大腿部の上側(臀部側)をテープで固定

詳しくはお気軽にお問い合わせください

小池イマテクス株式会社  
西日本営業部

TEL  
06-6203-7581

FAX  
06-6222-1106




小池イマテクス株式会社

〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-7 小池ビル


# 現場を汚さない!! 簡単装着!!

## STEP 1

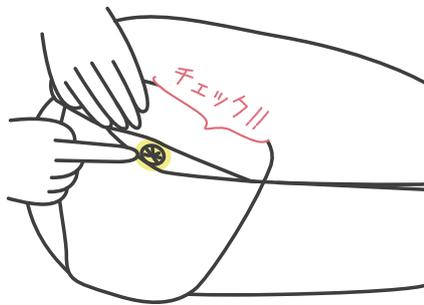


肛門の位置に  
指の挿入口を  
合わせる

## STEP 2

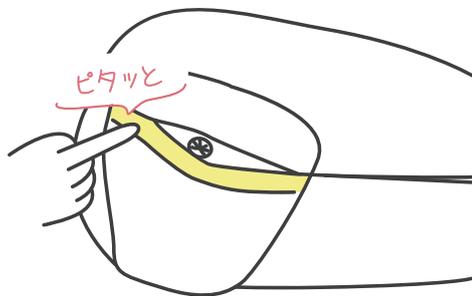

下側の大腿部と  
肛門下にテープで  
固定する

## STEP 3

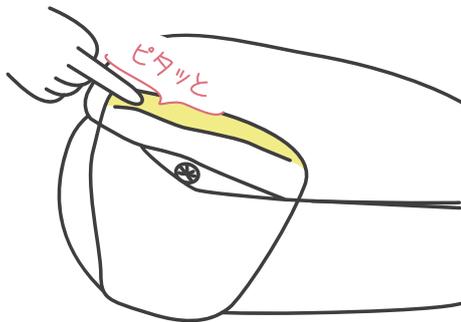

上側の大腿部に  
テープで固定する

## 処置開始



ステップ1~3が  
終わったら排便を  
開始する

品番	① B25001 ②B25020
商品名	ベントレール
サイズ	22.5 cm × 34.5 cm
入り数	① 3枚入り / 袋 ② 60枚入り / ケース
商品小売価格	オープン価格

ベントレールの  
使い方は  
こちらから

