

## ポータブルトイレ用 排泄処理袋

# 楽ぽい!

- 抗菌
- 消臭
- 水不要
- 使い捨て
- 10年保存

- ポータブルトイレのバケツにかぶせて使用する排泄処理袋+凝固剤です。
- 通常の排泄処理は汚水をトイレに流し、バケツを洗う。バケツの洗い場の洗浄も必要です。楽ぽいが排泄処理の手間や労力を軽減します。
- 排泄物からの感染症対策に有効です。
- 洋式トイレにかぶせて、災害時トイレ対策にも使えます。




30  
回分

- ・凝固剤：30袋
- ・処理袋：30枚
- ・取扱説明書

¥3,300  
(税抜¥3,000)


### 【使用方法】

バケツをポータブルトイレに設置し、使用します。

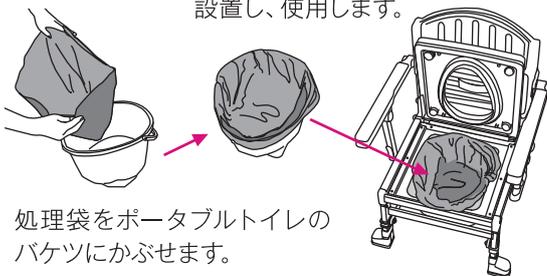


処理袋をポータブルトイレのバケツにかぶせます。

排泄後、凝固剤をふりかけます。

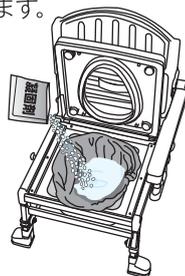

使用后、処理袋を取り出します。

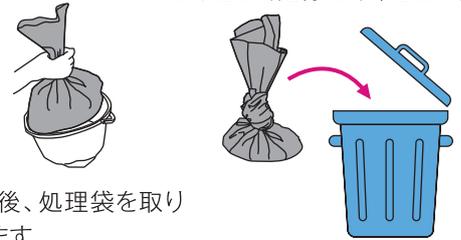

処理袋の口をしっかりと結び、ごみとして処分してください。

- 品番 / 7099
- 内容量 / (凝固剤) 7g×30袋 (処理袋) 縦50×横65cm×30枚
- 吸水量 / 約500ml (1回分)
- 材質 / (凝固剤) 高分子吸水ポリマー (処理袋) ポリエチレン
- JANCODE / 4519283006181



アルミ袋：PET・PE  
処理袋：PE  
外袋：PP

※各自治体の条例に当たって、可燃ごみとして処理してください。

※印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります。※サイズなどは多少個体差があります。あらかじめご了承ください。

### 取扱店

ウチエ株式会社  
<http://uchie.co.jp>



4 519283 006181

25.12

- 本社 / 大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29 TEL.(06)6482-0230 FAX.(06)6401-6372
- 関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3 TEL.(047)362-0311 FAX.(047)362-0312
- 福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5 TEL.(092)323-4331 FAX.(092)323-4332
- 兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井732-1