

New Model!

工具なしでシート幅が調整でき、体の大きめのご利用者様に幅広く対応します。(シート幅42・44・46cmの3段階調整式)

NA-SU7・Hi

補装具車椅子
レディメイド

249,500円(非課税)

00175-000435

耐120kg

自走用



座面高Hi(高)
ゆったりハイバック



シート幅調整式
SU7タイプ
シン・ウルトラ
自走用

タイヤ径
外径 φ
20

前座高
調節式^{※1}
43・45・47
cm cm cm



ノーパンクタイヤ
エアリ
装備

いつでも空気がいっぱい感覚で安心

NAH-SU7・Hi

補装具車椅子
レディメイド

249,500円(非課税)

00175-000436

耐120kg

介助用



座面高Hi(高)
ゆったりハイバック



シート幅調整式
SU7タイプ
シン・ウルトラ
介助用

タイヤ径
外径 φ
20

前座高
調節式^{※1}
43・45・47
cm cm cm




ノーパンクタイヤ
エアリ
装備

いつでも空気がいっぱい感覚で安心

NA-SU7・Hi

(シート幅調整式※42・44・46cm)

■車いす寸法
赤は初期出荷時設定

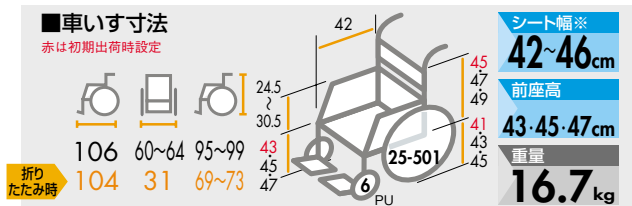


※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同等です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

NAH-SU7・Hi

(シート幅調整式※42・44・46cm)

■車いす寸法
赤は初期出荷時設定

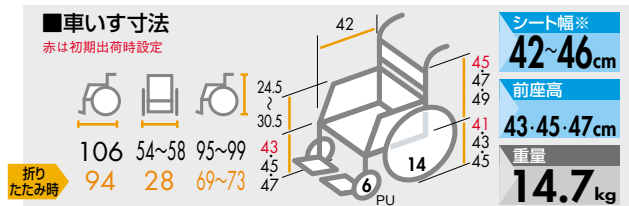

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同等です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

工具いらず、簡単操作でシート幅調整。

■工具いらず、
簡単操作でシート幅調整



シート幅42cm
シート幅46cm
※シート幅の調整については、取扱説明書の手順と注意事項を必ずおまわりください。



手順1
バックサポートシートと座クッションをはずし、インナーシートの面ファスナーをはずします。



手順2
カバーをはずし、ロックピンをつまんでロックを解除します。



手順3
そのまま折りたたみフレームを任意の位置までスライドします。



手順4
ロックが完全にかかっていることを確認し、カバーをかぶせます。



手順5
インナーシートの面ファスナーを貼りあわせ、バックサポートインナー下部を調整し、アウターシートと座クッションを装着して完了です。



▲シート幅の調整で体形の変化や着こみにも対応します。



バックサポート高
簡単調整

インナーシートを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ)

標準フレームカラー

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー

標準バックサポートカラー



デツコン(鉄紺)
カキチャ(柿茶)

ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

