

ROBOHELPER SASUKE (RS1-12Y-B) の特徴



使い方は簡単・抱き上げ式の優しい移乗



※ベッド下に脚を入れる空間が 必ず7cm以上 必要です。
10cm以上空間があれば、取り回しの良いキャスターのご用意ができます。

仕様 適用体重：120kg以下
適用身長：180cm以下
電源：リチウムイオン電池
充電時間：約2～4時間



ホームページ




ご紹介動画



カタログ・事例集
ダウンロード



使用の手順：左右の操作レバーで簡単操作 ↑↓

【ステップ1 抱き上げる】

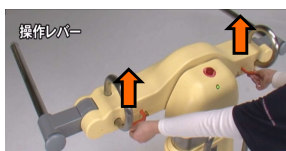


※両手操作※

【ステップ2 傾ける（起こす・寝かせる）】

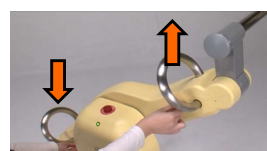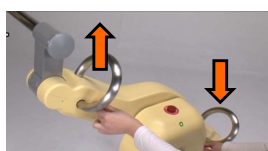

【ステップ3 降ろす】

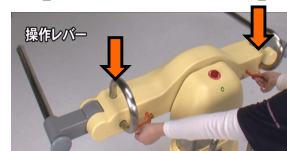

※両手操作※

※片手操作※



移乗のイメージ(ベッド～車いす)

車いすからベッドに戻る際は、この逆を行います

※片手操作※



【ステップ1 抱き上げる】

【ステップ2 傾ける（起こす・寝かせる）】

【ステップ3 降ろす】

ベッド上から抱き上げ

移乗する場所へ移動

適した姿勢に調整（臥位～座位）

車いすへ着座

- ①介護をおこなう方は、SASUKEの左右のアームを専用シート両端に差込み、シートごと介護を受ける方を抱き上げます。操作はシンプルで軽い力でできます。操作レバーは **※両手操作※** ↔ **※片手操作※** を使い分けることができます。
- ②介護を受ける方がシートごとベッドから上昇したら、ベッドから移動し、左右の操作レバーで適切な姿勢を調整（起こす・寝かせる）します。
- ③介護を受ける方を車いすに降ろします（着座）。

HPより介護ロボット導入活用事例集2018～2022(厚生労働省・テクノエイド協会)をご覧ください

ROBOHELPER SASUKE (RS1-12Y-B) の特徴



介護をうける方にもおこなう方にもやさしさと安全を

特徴

- ベッド⇄車いすの移乗をアシストします。専用シートで身体全体を支えるので、体圧分散し安定感があります。(※図1)
- お姫様抱っこのように抱え上げるので揺れも少なく、身体の上を遮る機器也没有ありません。介助をおこなう方は、対面で顔色や全身の様子をみながら 移乗介助ができます。
- 操作や手順は簡単。臥位から座位まで自由な角度と高さに調節でき、ベッド上での臥位姿勢のまま抱き上げること可能です。
- 車いすは標準型、リクライニング、ストレッチャー等幅広く対応。
- バッテリー式なので電源コードがなく、移動、取り回しが簡単。

効果



- 介助者の負担軽減
- 被介助者の負担軽減 (痛み、恐怖感、遠慮 等)
- 一連の介護の効率化 (2人介助から1人介助 等)
- 移乗介助が困難な場合 (皮膚トラブル、骨折・脱臼リスク、可動域制限、荷重制限 等) でも安全に移乗介助が可能
- 効率化と質の高いケアを可能にすることで介護サービスの生産性を向上

安全性

- ISO13482取得
- 体圧分散に優れたシートを使用


対象者 選定の目安

- 立位～臥位で被介護者への効果が期待できる
- ベッド上の臥位姿勢のまま移乗が可能

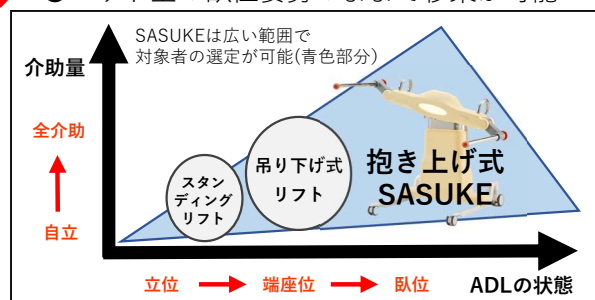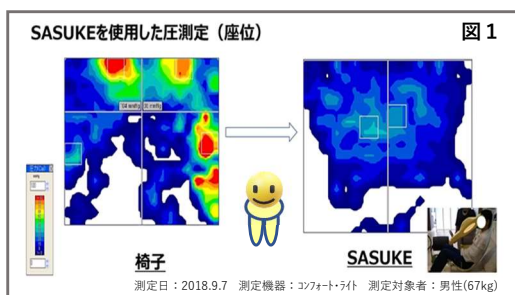

運用例

1日の流れ (運用例は対象者の状況に応じてご検討ください)

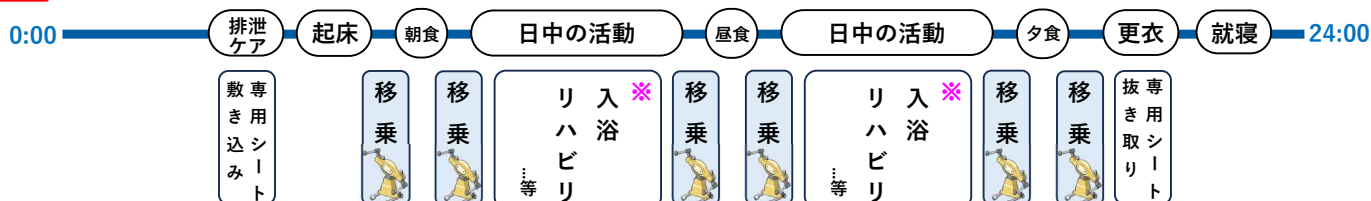

(※) 入浴場面では脱衣室でも利用可能
レク・リハなど寝たきりの方の活動・参加を促す場面でもご利用いただいています。

価 格

希望小売価格 (RS1-12Y-B)	TAISコード 01554-000005	998,000円 (非課税)
専用シートセットMサイズ	TAISコード 01554-000007	40,700円 (税込)
専用シートセットLサイズ	TAISコード 01554-000006	55,000円 (税込)
送 料		実 費

・・・リモートデモ、試用貸出 受付中・・・

ご希望があればお電話にてお問い合わせください ☎06-6229-9550

マッスル株式会社 ヘルスケア事業開発部

〒541-0042 大阪市中央区今橋2-5-8トレードピア淀屋橋6F

(E-Mail) healthcare@musclecorp.com (FAX) 06-6229-9560

(ホームページ URL) <https://musclecorp.com/care/>