



スウェーデンより登場

スタンディングアシスト&ベルト

Takeoff & Takeoff Belt

テイクオフ

テイクオフベルト

使用例

1. 起居動作の補助
2. 室内の短距離移動
3. 車いすなど座奥への座り直し
4. 足の踏み替えに代わる方向転換
5. 立ち上がり状態の確認
6. 術後やベッドサイドリハビリテーションでの使用 など



テイクオフベルト



テイクオフ

使用対象者と使用例

* 使用前に被介護者の動作状態の確認を行います

- 補助があれば立ち上がりや立位姿勢が取れて、バランスも取れる人
- スタンディングハンドルをつかめて、介助者の指示が理解できる人



■ 起居動作の補助



■ 室内の短距離移動



■ 方向転換



■ 座奥への座り直し



■ 立ち上がりの補助



■ リハビリテーション

こちらから、詳しい使用説明動画をご覧になれます。



起居動作の補助

立位姿勢が取れる方の立ち上がり動作を補助します。



足型イラストに足を乗せます。



レッグサポートを調整します。

テイクオフベルト(別売)と併用できます。



スタンディングハンドルをつかみます。



体の中心の位置を確認します。



介助者は前方より補助します。



ストラップの長さを調整します。

室内の短距離移動

被介助者の視線が高くなるため、視覚情報が増えます。足底に体重がかかり、自然に被介助者の下肢に力が入ります。



ポイント
テイクオフ前方の大型車輪により、小さな段差を乗り越えられます。



敷居レール例



カーペットの断端例

テイクオフベルト(別売)と併用できます。



介助者は自分の方向にテイクオフを引きずります。



＜介助者1名＞



＜介助者2名＞

トイレ介助

コンパクト設計のベースにより、狭い空間でも取り回しができます。同じ基点でベースが回転できるので、トイレ介助がしやすいです。



狭い空間でもアプローチしやすいです。



被介助者の正面でスタンディングハンドルをつかめます。

テイクオフベルト(別売)と併用できます。



半座位姿勢が取りやすいです。



その場で方向転換ができます。



ストラップをTサポートに引っ掛けて姿勢を保持します。



テイクオフベルトの下部分をまくり上げます。

座奥への座り直し

座位姿勢の座り直しを補助します。



車いすのフットレストを外します。被介助者は両足をベースに乗せます。



被介助者は半座位姿勢を取ります。介助者はベースを足で押さえます。



介助者は座奥に向かってテイクオフを押します。

立ち上がり状態の確認


既入院患者さんや入所者さんの動作状態の確認に使用できます。



被介助者の動作状態の確認を行います。



＜座位姿勢の確認＞

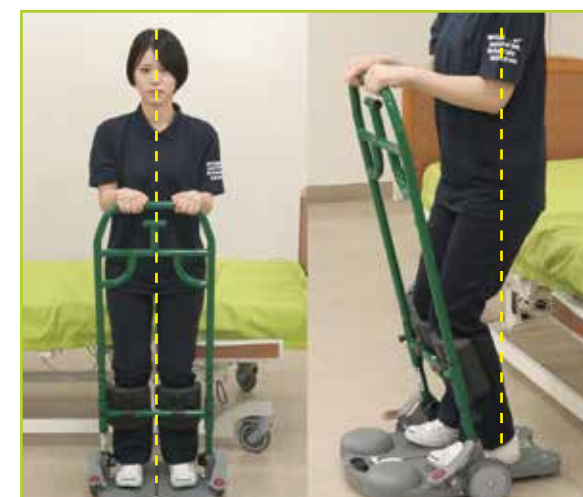

＜立位姿勢の確認＞

ベッドサイドリハビリテーション

手術後の立ち上がりや、ベッドサイドリハビリテーションのプログラムが実施できます。



立ち上がりトレーニングとして時間を測り、被介助者の動作状態の確認を行います。



ベッドの高さ調整により、負荷を変えてトレーニングできます。



重度被介助者にはテイクオフベルトを併用します。



テイクオフベルト 使用例 ◆歩行訓練 ◆車いす移乗

歩行訓練

ストラップハンドルをつかむことで、しっかりサポートできます。



＜介助者1名＞



＜介助者2名＞
介助者の腕を交差させて、安定感を増したサポートができます。

被介助者のズボンやおむつをつかむ事なく、
介助者は安定してサポートできます。

車いす移乗

重度被介助者の場合はテイクオフベルトとの併用をお勧めします。



お互いがストラップをつかめるので、姿勢が安定します。



被介助者の背面からサポートします。



＜介助者2名＞



＜介助者2名＞
座奥へしっかり座れます。

Takeoff テイクオフ



Tサポート



レッグサポート



ブレーキプレート



ベース

Takeoff Belt テイクオフベルト



バックル付きベルトストラップ



ストラップハンドル



介助時の折り返し

＜スペック表＞

型番	品名	サイズ	色・素材	耐荷重	お手入れ	TAISコード JANコード	販売単位	定価(税抜)
----	----	-----	------	-----	------	-------------------	------	--------

■テイクオフ 介護保険：福祉用具貸与（移動用リフト）

TOFFM	スタンディングアシスト テイクオフ	ベース：横幅約47cm、奥行幅約57cm 製品全体：高さ約105cm	ベース：グレー、鉄 支柱：グリーン、鉄	150kg *身長180cm以下	柔らかい布で中性洗剤を使用。 溶剤不可。消毒が必要な場合は70%アルコールを使用。	01624-000030 4562110152384	1台	176,000円
-------	----------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------	--	-------------------------------	----	----------

■テイクオフベルト 介護保険：福祉用具貸与（特殊寝台付属品） ●Sサイズ、Mサイズのみ適用

TOFFBXS	テイクオフベルト XSサイズ	90cm(腰囲(推奨)65-80cm)	綿、ポリエステル	150kg	洗濯機で洗濯が可能。 柔軟剤の使用はお控えください。	4562110152322	1枚	22,000円
TOFFBS	テイクオフベルト Sサイズ ●	105cm(腰囲(推奨)80-90cm)	綿、ポリエステル	150kg		01624-000031 4562110152339	1枚	22,000円
TOFFBM	テイクオフベルト Mサイズ ●	120cm(腰囲(推奨)90-105cm)	綿、ポリエステル	150kg		01624-000032 4562110152346	1枚	22,000円
TOFFBL	テイクオフベルト Lサイズ	135cm(腰囲(推奨)105-125cm)	綿、ポリエステル	150kg		4562110152353	1枚	22,000円

※ 本品は医療機器ではありません。

* 使用環境により耐荷重は異なります。

※ 製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※ 本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※ 本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元



本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

輸入元



大阪府北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044