



スウェーデンより登場!!

Flowboard Oval

フローボード オーバル



フローボードオーバルXSサイズ

フローボードオーバルMサイズ

特徴

- フローボードオーバルは2枚1組で使用します。
- 適度にしなり、楕円形で滑らかな表面です。容易にセットして、引き抜くことができます。
- ポリエチレン素材で、お手入れは洗剤や消毒液で清拭できます。
- 介護保険：福祉用具貸与(特殊寝台付属品)の製品です。

使用例



■ 寝位置の補正



■ 座奥への座り直し



■ 仰臥位姿勢でスリングシート装着の補助



■ 座位姿勢でスリングシート装着の補助

こちらから、詳しい使用説明動画をご覧になれます。



寝位置の補正

足と足底に力が込められる軽度被介助者は、ご自分の力でベッド上方へ移動できます。



- ポイント**
- ①エアマットレスとの組み合わせにも適しています。
 - ②介助者が被介助者の足底を固定し、体幹部分をフローボードオーバルの上で移乗します。

座奥への座り直し

座位姿勢の座り直しを補助します。

軽度被介助者の場合



重度被介助者の場合



スリングシートの装置の補助

被介助者の姿勢を変えることなく、スリングシートの装着ができます。

仰臥位姿勢の場合

フローボードオーバルMサイズを使用



◎エアマットレスとの組み合わせにも適しています。

座位姿勢の場合

フローボードオーバルMサイズとフローボードオーバルXSサイズを使用



< スペック表 > 介護保険・福祉用具貸与(特殊寝台付属品)

型番	品名	サイズ	色・素材	耐荷重	お手入れ	TAISコード	販売単位	定価(税抜き)
FBOXS	フローボードオーバル XSサイズ	45x20cm	ブラック・ポリエチレン	150kg	ぬるま湯または石鹸水で清拭。消毒が必要な場合は70%エタノールや45%イソプロパノールあるいはそれに近い消毒液を使用。	01624-000025	2枚/セット	34,000円
FBOM	フローボードオーバル Mサイズ	85x39cm	ブラック・ポリエチレン	150kg		01624-000026	2枚/セット	43,800円

※本品は医療機器ではありません。
※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。



スウェーデンより登場!!

Flowboard

フローボード

多様な座位移乗を補助します。
テイクオフベルト(別売)と併用できます。
介護保険：福祉用具貸与(特殊寝台付属品)の製品です。

こんな座位移乗の時に
ご使用できます。

車いす

ベッド

トイレ

車の座席

使用例 重度被介助者の場合はテイクオフベルト(別売)との併用をお勧めします。



軽度被介助者の場合
ご自身でフローボード上を移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例1〕
介助者が被介助者を支えながら移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例2〕
動きに合わせて介助者の体の向きを変えながら2〜3回に分けて移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例3〕
テイクオフベルト(別売)を併用して体幹を支えやすくして移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例4〕
テイクオフベルト(別売)を併用して被介助者の背
より介助して移乗します。



重度被介助者の場合〔移乗例5〕
テイクオフベルト(別売)を併用して被介助者2名で介
助して移乗します。



フローボードSサイズ表面



フローボードSサイズ裏面



フローボードMサイズ表面



フローボードMサイズ裏面



フローボードLサイズ表面



フローボードLサイズ裏面

※フローボードLサイズとMサイズには折り曲げ線が入っております。

< スペック表 > 介護保険：福祉用具貸与(特殊寝台付属品)

型番	品名	サイズ	色・素材	耐荷重	お手入れ	TAISコード	販売単位	定価(税抜き)
FBS	フローボード Sサイズ	60x25cm	グリーン・ポリエチレン	150kg*	ぬるま湯または石鹸水で拭拭。消毒が必要な場合は70%エタノールや45%イソプロパノールあるいはそれに近い消毒液を使用。	01624-000027	1枚	21,000円
FBM	フローボード Mサイズ	60x33cm	グリーン・ポリエチレン	150kg*		01624-000028	1枚	22,800円
FBL	フローボード Lサイズ	74x33cm	グリーン・ポリエチレン	150kg*		01624-000029	1枚	32,000円

* 移乗する隙間幅により耐荷重は異なります。

※本品は医療機器ではありません。

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元



本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

輸入元



大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044