



MODEL


L1-01WP

防水タイプ


入浴介助の 救世主



脱衣・入浴時の
立位保持

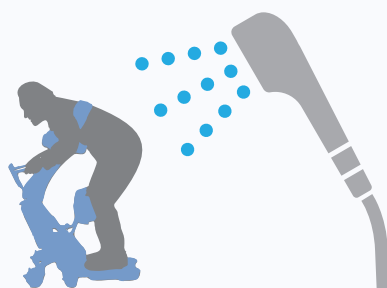

臀部シャワー

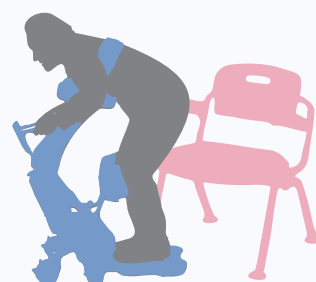


シャワーチェアへの
移乗介助

Hug 使い方簡単 3 ステップ

step1


立つ

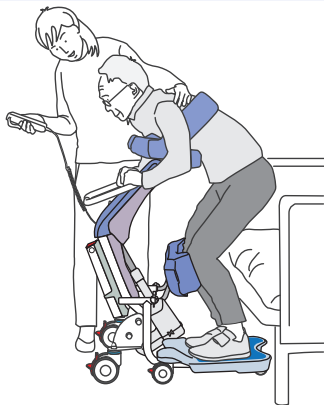

Hug に寄りかかった姿勢から、「立つ」ボタンで Hug がやさしく抱え上げます。
スリングシートなどは不要なため準備に時間がかかりません。

step2

動かす

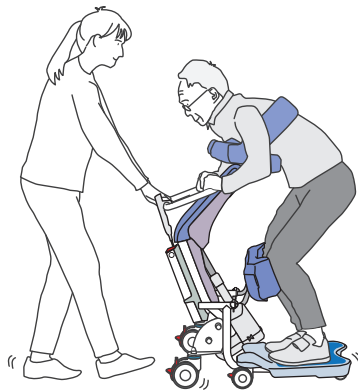

Hug に乗った状態で動かすことができるため、ベッド、車いす、トイレ、シャワーチェアなどへ移乗することが可能です。

step3

座る




移乗先に着いたら、「座る」ボタンで安全に座ることができます。
立位を保持することもできるため、更衣介助、排泄ケアも簡単に行えます。

参考価格：1,680,000 円（非課税）

機種名／型式	Hug L1WP / L1-01WP		種類	リチウムイオン電池
寸法（全長 × 全幅 × 全高）	880×550×890 ～ 1200mm		電圧	DC25.7V
総重量	32kg		充電時間	4 時間
使用者最大体重	100kg		最大使用回数	約 100 回（満充電より）
動作条件	温度	0 ～ 40℃	主要材質	ステンレス / ABS
IP 等級	IPX6		TAIS コード 01666-000008	

● 製品の仕様は予告無く変更することがあります。

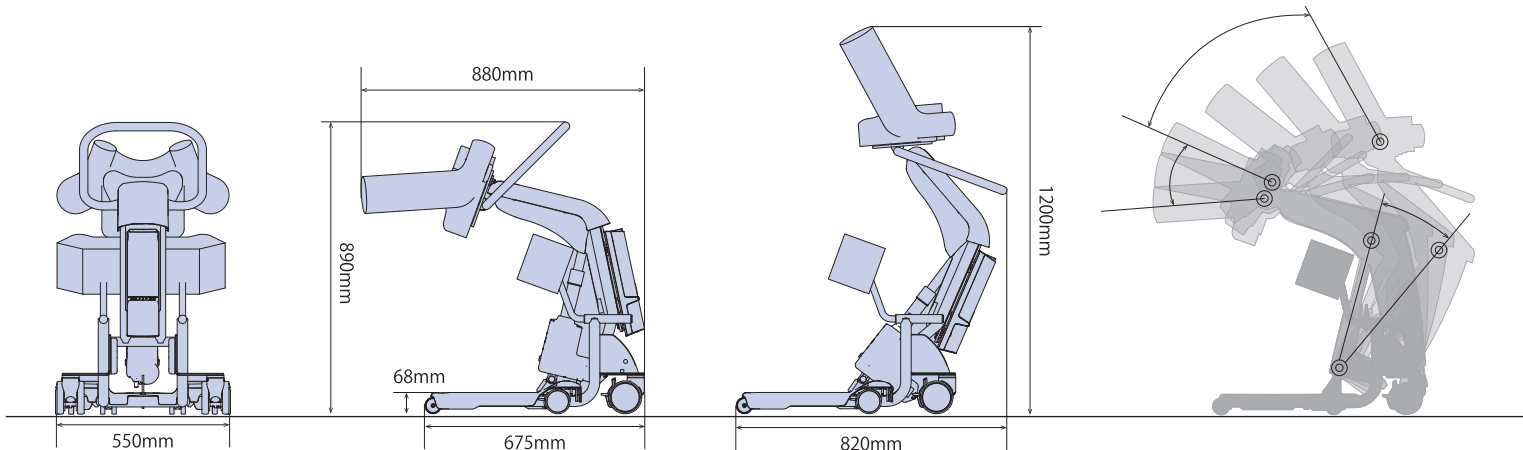

製品に関する情報とお問合せ

株式会社 FUJI
472-8686 愛知県知立市山町茶碓山 19
© 2024 FUJI CORPORATION. All Rights Reserved.



0566-55-8800

hug@fuji.co.jp <https://hug.fuji.co.jp>

Hug 公式 HP ↓



Cat.No.Hug_WP/2024.May